

L'Adipo-Cryo-Apoptose par le Cryolipolift®

L'Adipo-Cryo-Apoptose (littéralement destruction de la graisse par le froid) est une méthode de liporéduction sélective, non-invasive et indolore qui permet de réduire les tissus graisseux localisés. La technologie repose sur un phénomène physique parfaitement documenté (effet Peltier): un

applicateur en forme de coque « aspire » (vacuum) le pli adipeux qui va se loger au fond de celle-ci puis un mécanisme comparable à une « pompe à chaleur » va extraire de cette zone les calories et abaisser en quelques minutes la température de cette zone à une température proche de 0°.

FONCTIONNEMENT


Le CryoLipolift® est un appareil basé sur une technologie reposant sur un principe physique connu depuis longtemps: les cellules du tissu adipeux les adipocytes sont plus sensibles que les autres cellules à l'exposition prolongée au froid. L'objectif du traitement est la réduction des amas graisseux localisés par la destruction des adipocytes.

La technique combine l'aspiration sous vide du pli adipeux par une pièce à main spécifique ; nommée « Cryode » et son refroidissement à une température proche de 0°.

Il en découle une cristallisation des lipides contenus dans les adipocytes qui marque un point de non-retour dans l'évolution de ces cellules et tout cela, bien sûr, sans léser les tissus adjacents. Les adipocytes sont dès lors programmés pour un « suicide lent » appelé « apoptose » qui engendre une élimination lente par l'organisme de leur contenu sans altérer de façon significative le taux sanguin des lipides (cholestérol, triglycérides...). Le revêtement cutané s'adapte sans difficulté aux modifications morphologiques engendrées.

Ce traitement concerne essentiellement les patients sans excès de poids qui présentent une ou plusieurs zones graisseuses localisées résistantes le plus souvent aux efforts de régime.

Ces zones sont par exemple les « poignées d'amour » ou les bourrelets disgracieux de l'abdomen, du dessous des bras, les « culottes de cheval », plis du dos, intérieur des cuisses, fesses et cou.

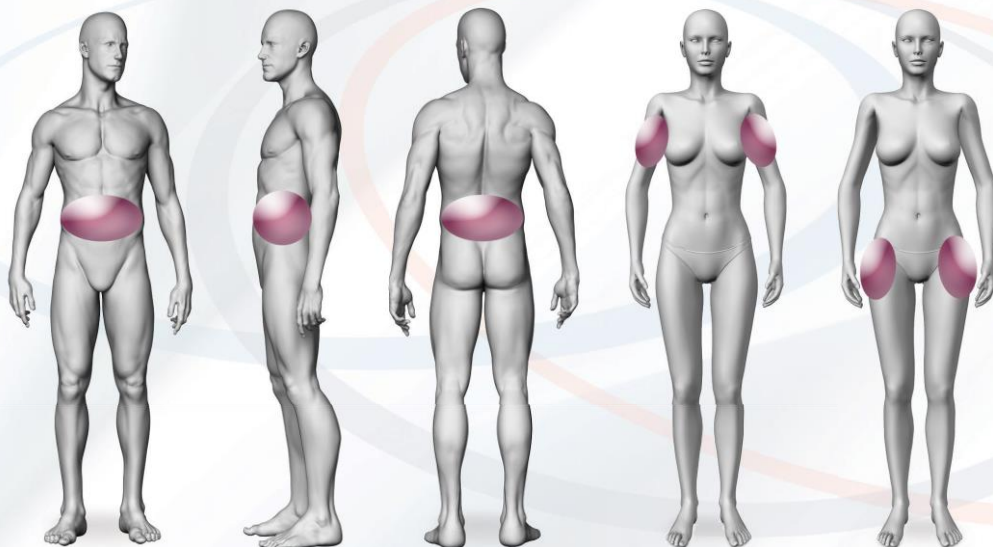

Abdomen
Homme / Femme

Hanches
Homme / Femme

Dos
Homme / Femme

Bras
Femme

Culotte de Cheval
Femme

Le CryoLipolift® constitue une bonne indication en complément d'une lipoaspiration jugée par le patient incomplète ou à parfaire sur certaines zones.

Avant d'accepter de traiter l'intérieur des bras, intérieur des cuisses, plis du dos, fesses et cou ; un examen clinique est nécessaire pour vérifier si une partie du volume en excès est constitué d'adipocytes.

En effet, l'Adipo-Cryo-Apoptose ne fait disparaître que les cellules graisseuses, pas les structures fibreuses. Pour différencier graisse et fibre, le pincement entre 2 doigts est généralement suffisant. Quand on pince de la graisse, c'est élastique, quand on pince de la fibre, on ressent une résistance incompressible.

La qualité des résultats obtenus par le **CryoLipolift®** est due à sa technologie: La « Cryode » en métal conducteur assure un refroidissement rapide et homogène. Les contrôles des paramètres de fonctionnement sont nombreux et sensibles. Ils assurent une parfaite sécurité au patient.



TEMPÉRATURE

3 températures :

- un contrôle de la température au demi degré près afin qu'elle ne soit pas trop basse
- un contrôle de la pente de refroidissement
- un contrôle de température supérieure.

VACCUM

Il existe un contrôle de l'intensité de la dépression et un contrôle de la pente d'installation de cette dépression.

PROGRAMME EXPERT

Si toutefois l'opérateur juge que les programmes paramétrés automatiques ne conviennent pas, il existe la possibilité du programme Expert.

LA CRYODE

- Le CryoLipolift® est utilisé avec une cryode par zone sélectionnée
- Le CryoLipolift® permet de traiter deux zones en même temps mains libres.

ADRIANA GUZMAN

CONTACT US IN PARIS

25, Avenue Bosquet 75007 Paris

+33 (0)1 46 22 92 22

Accessible aux personnes à mobilité réduite

contact@dradrianaguzman.com